

Pansement de protection auto-amalgamant **DERMASTOP**

Hygiène, traitement de l'odeur

Protégez vos plaies facilement.



Présentation

DERMASTOP est un bandage cohésif applicable directement sur une plaie ou une peau suintante après désinfection. Pansement étanche à la poussière et à l'eau, DERMASTOP est également une aide précieuse à la cicatrisation.



Points forts

- Application et retrait facile
- Ne colle ni à la peau ni aux poils
- Ne limite pas les mouvements
- De couleur bleue pour une détection visuelle

Propriétés

- Pansement auto-amalgamant applicable rapidement et sans outil même sur une peau mouillée.
- Il se découpe facilement sans outils, est utilisable de n'importe quel côté et ne forme qu'une seule protection indéchirable comme une second peau.
- N'entrave pas les mouvements puisqu'il ne colle pas à la peau.
- Étanche à la plupart des liquides standards mais perméable à l'air.
- Arrête mécaniquement le saignement apportant une aide précieuse à la cicatrisation.
- De couleur bleue, facilement détectable au cours d'un process de fabrication.
- Dispositif médical de classe I qui répond aux exigences du règlement CE 2017/745.

Mode d'emploi

- Une désinfection initiale de la plaie reste souhaitable.
- Retirer la bande de protection.
- Déchirer la longueur souhaitée.
- Appliquer le pansement en l'enroulant sur lui-même.
- Ne pas serrer le bandage trop fort. Veiller à bien tendre la bande pour assurer une complète adhésion : éviter les plis et les zones d'air.
- Le retrait de la bande est indolore car DERMASTOP n'adhère pas à la peau.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : DER31116

Aspect : Solide

Couleur : bleue

Odeur : inodore

Caractéristiques complémentaires

Longueur : 2m

Largeur: 38mm

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Carton de 6 rouleaux de 2m par 38mm de largeur

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Produit non soumis à la rédaction d'une fiche de donnée de sécurité.

Stockage

Stocker dans son emballage d'origine, bien fermé à température ambiante hors humidité.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 60 mois